

CCOO (Charcot Controlerende Orthopedische Orthese)

CCOO (Charcot Controlerende Orthopedische Orthese)

Algemene omschrijving:


CCOO (hierna als orthese genoemd) is een acroniem voor Charcot Controlerende Orthopedische Orthese. Deze orthese wordt voorgeschreven voor patiënten die voetulcera of gevoelloze voeten (geen gevoel) hebben. Dit is een orthese die in twee schalen is uitgevoerd en beslaat de gehele voet en kuit van het onderbeen, het lijkt op een skischoenen (zie figuur 1). Hoewel het een beetje groot en omvangrijk is, geeft de orthese enorme steun en het voorkomt beweging van voet en enkel. Deze is volledig opgevuld aan de binnenkant. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een schoen over de orthese.



figuur 1

Toepassing:


1. Breng een katoenen tricot of een lange (dunne) katoenen sok met been aan (zie figuur 2).
2. Schuif de orthese in de juiste positie, zodat de hiel goed achterin in de orthese (zie figuur 3). De hiel moet helemaal in contact staan met de onderkant van de voetplaat. Controleer, door te kijken langs de zijkanten en de achterkant.
3. Breng het voorste gedeelte van de orthese aan en zorg ervoor dat de zijkanten over lappen met de achterkant (zie afbeelding 4).
4. Breng eerst de wreefband aan de voorzijde van de enkel aan (zie figuur 5).
5. Bevestig dan alle resterende banden (zie figuren 6 en 7).
6. De huid moet worden gecontroleerd op roodheid, roodheid verdwijnt na ongeveer 15 minuten. Lichte roodheid is gebruikelijk op de wreef en onder de bal van de voet.

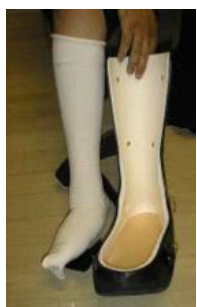

figuur 2



figuur 3

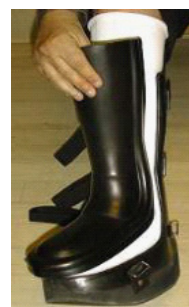

figuur 4



Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrument-makerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.

Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.

CCOO (Charcot Controlerende Orthopedische Orthese)



figuur 5



figuur 6



figuur 7

Het dragen van de orthese:

Op de eerste dag dat u de orthese gaat dragen dient u dit geleidelijk op te bouwen. Te beginnen door het dragen van de spalk voor slechts 1 uur. Na 1 uur verwijder de banden en controleer uw huid op rode plekken. Sommige kleine, lichte rode plekken kunnen opgemerkt worden. Deze rode plekken verdwijnen in 20 tot 30 minuten na het verwijderen van de orthese.

Lichte roodheid is gebruikelijk op de wreef en onder de bal van de voet. Als de rode plekken niet weg gaan in 20 tot 30 minuten of als er bij u krassen, blauwe plekken of blaren zichtbaar zijn, doe dan de orthese niet weer aan. Neem dan contact op met uw orthopedisch instrumentmaker om een afspraak te maken.

Als de huid goed is, wacht minstens 1 uur en dan weer de orthese om doen voor gedurende 1 uur per keer voor de rest van de eerste dag, controleer uw huid na elk uur.

Op de tweede dag, draag de orthese nu gedurende 2 uur achtereen. Na 2 uur, verwijder de banden en controleer de huid. Als de huid in orde is, doe de orthese om gedurende 2 uur voor de rest van de dag, het controleren van de huid na elke 2 uur. Als uw huid goed is en vrij van rode plekken is, kunt u geleidelijk het dragen verhogen met 1 uur per dag, het controleren van de huid na elke opgebouwde draagtijd.

Reiniging en onderhoud:

De beste manier om een orthese schoon te maken is aan de binnenkant in te spuiten met alcohol en droog te vegen zodat het lichaamsoliën en resten verwijdert. Het kan ook worden gereinigd door het met een vochtige handdoek met antibacteriële zeep, of antibacteriële vochtige doekjes. Bij gebruik van de orthese onder de douche dient u de orthese goed na te drogen. Houd de orthese uit de buurt van grote hitte om schade aan het kunststof te voorkomen.

Tips en probleemoplossing:

- Een goede schoen moet ten alle tijden aan de andere voet worden gedragen.
- Als u merkt dat rode vlekken, blauwe plekken, of blaren op uw huid ontstaan, stop dan met het dragen van de orthese en bel uw orthopedisch instrument maker om een afspraak te plannen.
- Als er problemen of vragen zijn, neem contact op met de orthopedisch instrumentmaker.



Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch instrumentmakerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.

Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.