

## Spreidbeugel

### De werking van deze bandages/spreidbeugels.

Door middel van deze bandages/spreidbeugels worden de heupen gebogen en uit elkaar gehouden (de spreidstand), hierdoor komt de heupkop recht tegenover de heupkom en zal het gewricht gestimuleerd worden om zich op de juiste wijze te ontwikkelen. Bij jonge kinderen bestaat de heupkom uit kraakbeenweefsel, dat zich goed laat vervormen door de druk van de heupkop. Zo ontstaat er een nieuw heupkommetje. Het resultaat van de spreidbehandeling wordt gecontroleerd door middel van een röntgenfoto.

### Na controle:

Meestal wordt er een half jaar na het einde van de behandeling een afspraak voor controle gemaakt.

### Ontwikkeling:

Ook al zijn de beentjes gespreid, toch kan uw kind in de meeste gevallen leren zitten, kruipen, draaien. Wel kan het uw kind meer moeite kosten om het evenwicht te bewaren, waardoor het lastig wordt om op een loopauto, fietsje of wipkip te gaan zitten zonder dat het opzij zal glijden.

Wanneer het kind gaat staan en lopen is een Hilgenreiner beugel aangewezen. De andere bandages/spreidbeugels zijn daar niet geschikt voor. Als uw kind een kleine ontwikkelingsachterstand heeft opgelopen, zal het deze meestal snel weer inhalen wanneer de spreidbeugel overdag enige tijd uit mag. Ook kan het even duren voordat de beentjes, die lang gespreid zijn geweest, weer helemaal gestrekt kunnen worden.

### Praktische tips

Bij een baby in een spreidmiddel komt luierlekkage, als gevolg van de spreidstand van de beentjes, vaker voor dan normaal en er moet daardoor vaker worden verschoond. Het is beter om het kind daarbij niet bij de voetjes vast te pakken, omdat hierdoor de heupjes teveel worden gestrekt en dit een verergering van de afwijking tot gevolg kan hebben. Dit geldt ook voor het strekken van de beentjes, bijvoorbeeld om de lichaamslengte op te meten.

Soms ontstaan door de spreidstand smetplekjes in knie- en liesplooien. Deze kunnen het beste dun worden ingesmeerd met zinkzalf.(verkrijgbaar bij drogist) Meestal kan onder het spreidmiddel dunne kleding worden gedragen, zoals een aaneengesloten kruippakje, een luierpakje of een (katoenen) maillootje.

Over het spreidmiddel heen kan nog wijde soepele, liefst katoenen, kleding worden gedragen. Om te voorkomen dat uw kind de klittebandsluitingen van de spreidbeugel lostrekt, is het dragen van ruime pyjama- of joggingpakjes heel handig. Ook broekjes met een binnenbeensluiting zijn heel praktisch.

Soms is het door de langdurige spreidstand moeilijk om de beentjes bij elkaar te krijgen voor het aantrekken van kleding. In dat geval is het handig om in een maillot knoopsgatelastiek aan te brengen om een wijde instap mogelijk te maken.



### Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

### Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrument-makerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

### Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.

Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.

## Spreidbeugel

### Vervoer - Draagzak of rugzitje



Het vervoer van uw kind in een draagzak (in heupspreidpositie) of rugzitje is gunstig. De beentjes worden dan vanzelf gespreid, wat goed is voor de ontwikkeling van het heupgewricht.

Een wandelwagen of buggy met een soepele zijkant en een naar voren uitstekende zitting zijn het meest geschikt. Ruimte achter het rugzetje kan eventueel worden opgevuld met kussentjes/opgerolde handdoeken en de beentjes kunnen over de zijkant uitsteken.

Op de fiets met spreidbeugel of Pavlikbandage kan een kind in een fietszitje met open zijkant aan het stuur. Eventueel kunt u eerst de beugel in het zitje plaatsen, dan uw kind erin zetten en vervolgens de spreidbroek sluiten. Doe uw kind wel altijd een tuigje om, omdat het gemakkelijk voorover kan vallen. Met een dynamische spreidbeugel kan een kind in een Bobike-fietszitje.

Er zijn ook autostoeltjes die achterop de fiets kunnen worden geplaatst. Laat uw kind hierin echter niet te lang zitten, omdat het halfliggend de schokkende bewegingen minder goed kan opvangen. Let vooral ook op de veiligheid. Door het gewicht aan de achterzijde van de fiets, is deze minder stabiel en kan deze sneller omvallen.

Aan de hand van foto's laten we zien hoe het kind in de verschillende beugels/bandages moet zitten. Waar men op moet letten als het kind het spreidbeugeltje aan heeft: Dat er geen overdreven drukplekken ontstaan, en er genoeg ruimte moet zijn, t.h.v. de knieholtes. Als het beugeltje te klein wordt moet men contact opnemen met de Orthopedisch Technicus en het laten controleren.

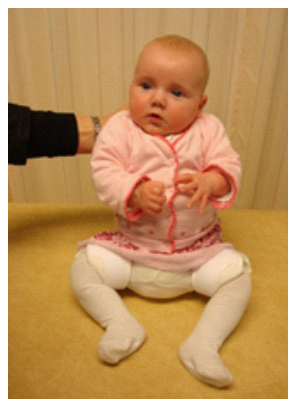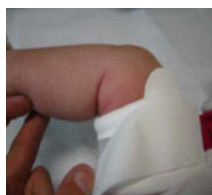

### Spreidbeugelbehandeling

Van een luxeerbare heup en heupdysplasie.



Normaal



Luxatie



Dysplasie

Heupdysplasie op de leeftijd van 3 maand tot 12 maand en een ontwrichting tot de leeftijd van 6 maand kan behandeld worden, d.m.v. een;

1. Dynamisch spreidbroekje; - 2. Vast spreidbroekje; - 3. Pavlikbandage.



### Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

### Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrument-makerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

### Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.

Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.